

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	DOKÜMAN KODU	S.PL.TL.36
		YAYIN TARİHİ	01.11.2019
		REVİZYON NO	-
	ALJİNAT CİHAZI ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	-
		SAYFA NO	1 / 2

1. AMAÇ

Talimatın amacı; alginatauto - mixer cihazının çalıştırılmasının ve bakım onarımının tanımlanmasıdır.

2. KAPSAM

NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

Teknik bakım onarım servisi ve cihazı kullanan personel sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI:

6.1.1. Cihaz prize takılır.

6.1.2. ON düğmesine basılır, cihaz açılır.

6.1.3. İstenilen miktarda alginata, alginata kabına konur. Bir miktar su ile karıştırılır.

6.1.4. Cihazın üst kapağı açılır, alginata kabı yerine konur. Kapak kapatılır.

6.1.5. (+) ve (-) tuşları ile istenilen süre ayarlanır. "START"düğmesine basılır.

6.1.6. İşlem tamamlandıktan sonra alginata kabı çıkarılır, ölçü kaşıklarına alginata konur.

6.1.7. OFF düğmesine basılır, cihaz kapatılır.

6.2. CİHAZIN BAKIM VE ONARIMI:

6.2.1. Teknik servis personeli fakültedeki tüm makine ve cihazların fakülte içi bakım tarihlerini gösterir, "YILLIK BAKIM PLANI" hazırlar. Bu plana uygun olarak bakım işlerinin yapılmasını sağlar.

6.2.2. Teknik servis sorumlusu periyodik bakım kapsamındaki tüm makine ve cihazlar için "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU" düzenler, birimlerden gelen planlı bakım dışında onarım talepleri ise "Arıza Talep Formu" ile teknik servis sorumlusuna aktarılır. Onarım faaliyeti sonucunda gerekli bilgileri "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU"na işler.

6.2.3. Cihazı kullanan personel; makine ve cihazlarda arıza olduğunda "Arıza Talep Formu" doldurur ve teknik servis görevlisini arıza hakkında bilgilendirir, cihazın üzerine "KULLANIM DIŞI EKİPMAN ETİKETİ" asılır.

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	DOKÜMAN KODU	S.PL.TL.36
		YAYIN TARİHİ	01.11.2019
		REVİZYON NO	-
	ALJİNAT CİHAZI ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	-
		SAYFA NO	2 / 2

6.2.4.Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza fakülte imkânları ile giderilemeyecekse servisi veya satıcı firması ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar. Arıza sonrası "BAKIMA TABİ CİHAZ SİCİL FORMU" teknik servis sorumlusu tarafından tutulur.

6.3.Alginate Auto- Mixer Cihazı Bakım Talimatı

6.3.1.Üç Aylık Bakım:

6.3.1.1. Fiziki temizliği yapılır.

6.3.1.2. Çalışması kontrol edilir.